

Un réseau national d'orthoprothésistes

Au service de votre autonomie et de votre bien-être...

Agen :	05 53 68 05 64	Montpellier :	04 67 52 47 48
Arnas :	09 70 75 55 40	Moulins :	04 70 46 85 46
Amiens :	03 22 50 37 60	Mulhouse :	03 89 34 12 82
Angers :	02 41 44 20 88	Nancy :	03 83 85 41 41
Avignon :	04 90 85 11 76	Nantes :	02 51 89 92 43
Bayonne :	05 59 70 56 61	Niort :	05 49 35 30 30
Besançon :	03 81 41 54 54	Nogent/Marne :	01 48 72 96 81
Bordeaux :	05 57 26 10 40	Paris 13° orthèse	01 45 86 63 63
Bourg-en-Bresse :	04 74 21 19 00	Paris 13° prothèse	01 46 20 10 19
Brest :	02 90 82 84 74	Paris 16° :	01 40 50 26 39
Brive :	05 55 17 24 18	Paris 17° :	01 42 93 92 10
Carqueiranne :	04 94 48 28 92	Périgueux :	05 53 54 36 50
Chambéry-Annecy :	04 79 85 71 21	Perpignan :	04 68 68 33 23
Chalon sur Saône :	03 85 93 67 79	Plérin :	02 96 52 42 06
Caen :	02 31 15 58 58	Poitiers :	05 49 38 87 17
Chartres :	02 43 39 22 90	Reims :	03 26 47 49 29
Cherbourg :	02 33 22 59 05	Rennes :	02 99 67 35 34
Clermont-Ferrand :	04 73 28 44 95	Roscoff :	02 98 29 39 55
Dijon :	03 80 78 42 00	Rouen :	02 35 88 17 25
Gap :	04 13 19 12 11	Saint-Nazaire :	02 51 89 92 43
Laval :	02 43 56 42 45	Saint-Quentin :	03 23 67 67 39
Le Mans :	02 43 39 22 90	Saint-Etienne :	04 77 57 62 64
Lorient :	02.56.54.81.81	St Malo :	02 99 40 10 91
Limoges :	05.87.41.83.03	Toulouse :	05 61 40 49 18
Lille :	03 20 04 41 71	Tours :	02 47 28 91 59
Lons le Saunier :	03 84 25 91 86	Valence :	04 75 40 81 40
Lyon :	04 72 84 77 30	Vannes :	02 97 62 00 02
Marseille :	04 91 79 32 44	Versailles :	01 39 55 45 38
Melun :	01 64 09 42 18	Vichy :	04 70 59 23 39
Metz :	03 87 74 41 32		
Mont-de-Marsan :	05 58 51 14 68		
Montluçon :	04 70 64 35 37		

Pour plus d'information sur les établissements PROTEOR :

www.proteor.fr



www.orthopedie.proteor.fr
rubrique : notre réseau

NOTICE D'UTILISATION

APPAREIL DE VERTICALISATION



Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un Orthoprothésiste agréé, selon la prescription de votre médecin.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.

Protection des données : Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : dpo@proteor.com



Groupe PROTEOR
6 rue de la Redoute
21850 St Apollinaire

DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

Orthèse de maintien, sur mesure, de l'ensemble du corps en position érigée antérieure ou postérieure. L'orthèse peut être équipée de diverses adjonctions (socle muni de roulettes, têtère, tablette ...)

Ce type de matériel a pour objectif le positionnement vertical dans un but thérapeutique.

CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

Ce dispositif nécessite le concours d'une ou deux tierces personnes pour la mise en place du patient, selon son poids et son handicap.

Le verticalisateur est positionné en position horizontale, les freins bloqués.

Après installation du patient dans la coque pelvi-pédieuse, toutes les sangles de maintien doivent être positionnées et serrées correctement, mais sans excès. Le patient peut alors être verticalisé.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

L'utilisation de ce matériel dépend essentiellement de l'aptitude et de la tolérance du patient.

L'utilisation de la tablette pour des activités ludiques permet une meilleure acceptation de l'appareillage.

Malgré la présence de roulettes, ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé comme moyen de locomotion. Les déplacements du patient dans son verticalisateur doivent toujours être faits par une tierce personne responsable.

Ce dispositif est prévu pour de petits déplacements sur une surface plane.

Les réglages et serrages ont été réalisés par nos soins afin de garantir une utilisation optimale et une sécurité de l'appareil (hors dispositif de fixation de la coque). Ceux-ci ne doivent en aucun cas être modifiés par une personne non habilitée.

En cas de modification morphologique et notamment en cas de prise de poids, ne pas hésiter à solliciter l'orthoprothésiste ou le médecin responsable de l'appareillage.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

La peau du patient doit être surveillée chaque jour.
En cas d'incontinence, il est conseillé de désinfecter l'assise régulièrement.

Un nettoyage avec un chiffon humide suivi d'un séchage doit être fait régulièrement, afin d'éviter que toute salissure n'entrave le bon coulissement des différents éléments ainsi que la bonne fixation de la coque.

Toute apparition anormale de jeu dans les pièces métalliques, de même que toute pièce de solidarisation manquante (vis, rivet,...) doit être immédiatement signalée au fabricant.

CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

Le dispositif doit être placé dans un lieu à température ambiante, non humide et éloigné d'une forte source de chaleur.

Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

EFFETS SECONDAIRES :

Une utilisation prolongée peut provoquer des hyper-appuis qui sont à surveiller.

CONTRÔLES :

Rester en contact avec le médecin responsable de l'appareillage et l'orthoprothésiste pour contrôler l'adaptation de l'orthèse pendant la durée du traitement.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.

Une vérification des différents réglages doit être faite tous les deux ou trois mois, afin d'optimiser l'utilisation de l'appareillage en fonction de la croissance et des progrès obtenus.