

## Un réseau national d'orthoprothésistes

Au service de votre autonomie et de votre bien-être...

<b>Agen :</b>	05 53 68 05 64	<b>Montpellier :</b>	04 67 52 47 48
<b>Arnas :</b>	09 70 75 55 40	<b>Moulins :</b>	04 70 46 85 46
<b>Amiens :</b>	03 22 50 37 60	<b>Mulhouse :</b>	03 89 34 12 82
<b>Angers :</b>	02 41 44 20 88	<b>Nancy :</b>	03 83 85 41 41
<b>Avignon :</b>	04 90 85 11 76	<b>Nantes :</b>	02 51 89 92 43
<b>Bayonne :</b>	05 59 70 56 61	<b>Niort :</b>	05 49 35 30 30
<b>Besançon :</b>	03 81 41 54 54	<b>Nogent/Marne :</b>	01 48 72 96 81
<b>Bordeaux :</b>	05 57 26 10 40	<b>Paris 13° orthèse</b>	01 45 86 63 63
<b>Bourg-en-Bresse :</b>	04 74 21 19 00	<b>Paris 13° prothèse</b>	01 46 20 10 19
<b>Brest :</b>	02 90 82 84 74	<b>Paris 16° :</b>	01 40 50 26 39
<b>Brive :</b>	05 55 17 24 18	<b>Paris 17° :</b>	01 42 93 92 10
<b>Carqueiranne :</b>	04 94 48 28 92	<b>Périgueux :</b>	05 53 54 36 50
<b>Chambéry-Anancy :</b>	04 79 85 71 21	<b>Perpignan :</b>	04 68 68 33 23
<b>Chalon sur Saône :</b>	03 85 93 67 79	<b>Plérin :</b>	02 96 52 42 06
<b>Caen :</b>	02 31 15 58 58	<b>Poitiers :</b>	05 49 38 87 17
<b>Chartres :</b>	02 43 39 22 90	<b>Reims :</b>	03 26 47 49 29
<b>Cherbourg :</b>	02 33 22 59 05	<b>Rennes :</b>	02 99 67 35 34
<b>Clermont-Ferrand :</b>	04 73 28 44 95	<b>Roscoff :</b>	02 98 29 39 55
<b>Dijon :</b>	03 80 78 42 00	<b>Rouen :</b>	02 35 88 17 25
<b>Gap :</b>	04 13 19 12 11	<b>Saint-Nazaire :</b>	02 51 89 92 43
<b>Laval :</b>	02 43 56 42 45	<b>Saint-Quentin :</b>	03 23 67 67 39
<b>Le Mans :</b>	02 43 39 22 90	<b>Saint-Etienne :</b>	04 77 57 62 64
<b>Lorient :</b>	02.56.54.81.81	<b>St Malo :</b>	02 99 40 10 91
<b>Limoges :</b>	05.87.41.83.03	<b>Toulouse :</b>	05 61 40 49 18
<b>Lille :</b>	03 20 04 41 71	<b>Tours :</b>	02 47 28 91 59
<b>Lons le Saunier :</b>	03 84 25 91 86	<b>Valence :</b>	04 75 40 81 40
<b>Lyon :</b>	04 72 84 77 30	<b>Vannes :</b>	02 97 62 00 02
<b>Marseille :</b>	04 91 79 32 44	<b>Versailles :</b>	01 39 55 45 38
<b>Melun :</b>	01 64 09 42 18	<b>Vichy :</b>	04 70 59 23 39
<b>Metz :</b>	03 87 74 41 32		
<b>Mont-de-Marsan :</b>	05 58 51 14 68		
<b>Montluçon :</b>	04 70 64 35 37		

Pour plus d'information sur les établissements PROTEOR :

[www.proteor.fr](http://www.proteor.fr)



www.orthopedie.proteor.fr  
rubrique : notre réseau

## NOTICE D'UTILISATION

### ORTHESE PFC CHIGNON



*Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un Orthoprothésiste agréé, selon la prescription de votre médecin.*

*Sa confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.*

**Protection des données :** Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : [dpo@proteor.com](mailto:dpo@proteor.com)



**Groupe PROTEOR**  
6 rue de la Redoute  
21850 St Apollinaire

## DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

L'orthèse PFC Chignon est une orthèse mollet-plante réalisée sur mesure, amovible, en matériaux thermoformables. Elle est portée pour la déambulation quotidienne s'intégrant dans les programmes de rééducation.

Le système PFC (Positioning Foot Control) permet un contrôle du pied dans les trois dimensions simultanément :

- Flexion dorsale et flexion plantaire
- Rotation interne ou externe
- Inversion Eversion

L'orthèse PFC Chignon est conçue pour corriger un mauvais positionnement du pied d'origines diverses avec répercussion sur le genou lors de la déambulation.

## CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

Positionner l'orthèse selon les repères anatomiques et effectuer le serrage des sangles nécessaires en fonction des indications données par son orthoprothésiste.


Il faut toujours mettre une chaussette non synthétique en interface entre la peau et l'appareil.

La durée de port d'une nouvelle orthèse doit être augmentée progressivement. N'utiliser ni talc ni crème grasse.

## CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

Il est formellement déconseillé de marcher sans chaussure. Les chaussures hautes sont fortement déconseillées.

Il faut privilégier une chaussure s'ouvrant largement vers l'avant avec une hauteur de talon minimum de 0,5 cm

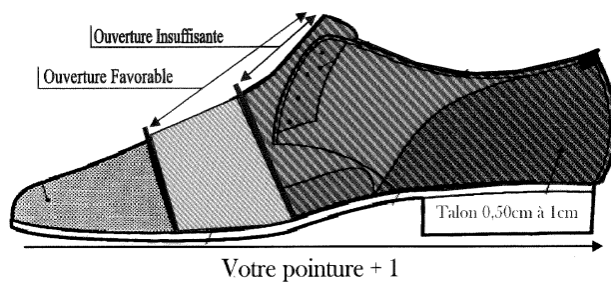

(Jaune)

Il est interdit de s'agenouiller avec une PFC



(Jaune)

Il est interdit de modifier l'appareil ou ses réglages sans la présence de son orthoprothésiste



(Jaune)

En cas de douleur, jeu ou bruit, consulter son orthoprothésiste »

## CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Une toilette quotidienne est nécessaire. La peau doit être surveillée chaque jour. L'orthèse doit être nettoyée régulièrement.

- Les parties en plastique des orthèses doivent être lavées régulièrement à l'eau savonneuse, rincées et essuyées.
- Les garnitures amovibles sont lavables à basse température (30°), séchage à plat.
- Les articulations des orthèses, la visserie et le système élastique de rappel doivent être contrôlés par l'orthoprothésiste.

## CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

L'orthèse PFC Chignon ne doit pas être placée à proximité d'une forte source de chaleur.

Il ne faut pas la laisser à portée des animaux domestiques.

Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

## EFFETS SECONDAIRES :

Réactions cutanées possibles, rougeurs, irritations...

Si les troubles persistent, consulter son médecin et/ou son orthoprothésiste.

## CONTRÔLES :

Rester en contact avec son médecin responsable de l'appareillage et son orthoprothésiste pour contrôler l'adaptation de l'orthèse pendant la durée de vie de l'orthèse, au minimum une fois par an.

Respecter le suivi médical préconisé.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.

En cas de modification morphologique et notamment en cas de prise de poids, ne pas hésiter à solliciter son orthoprothésiste ou son médecin.

Avant de pratiquer des activités susceptibles de contraintes élevées, consulter le médecin responsable de l'appareillage pour savoir si cela est possible.