

Un réseau national d'orthoprothésistes

Au service de votre autonomie et de votre bien-être...

Agen :	05 53 68 05 64	Montpellier :	04 67 52 47 48
Arnas :	09 70 75 55 40	Moulins :	04 70 46 85 46
Amiens :	03 22 50 37 60	Mulhouse :	03 89 34 12 82
Angers :	02 41 44 20 88	Nancy :	03 83 85 41 41
Avignon :	04 90 85 11 76	Nantes :	02 51 89 92 43
Bayonne :	05 59 70 56 61	Niort :	05 49 35 30 30
Besançon :	03 81 41 54 54	Nogent/Marne :	01 48 72 96 81
Bordeaux :	05 57 26 10 40	Paris 13° orthèse	01 45 86 63 63
Bourg-en-Bresse :	04 74 21 19 00	Paris 13° prothèse	01 46 20 10 19
Brest :	02 90 82 84 74	Paris 16° :	01 40 50 26 39
Brive :	05 55 17 24 18	Paris 17° :	01 42 93 92 10
Carqueiranne :	04 94 48 28 92	Périgueux :	05 53 54 36 50
Chambéry-Annecy :	04 79 85 71 21	Perpignan :	04 68 68 33 23
Chalon sur Saône :	03 85 93 67 79	Plérin :	02 96 52 42 06
Caen :	02 31 15 58 58	Poitiers :	05 49 38 87 17
Chartres :	02 43 39 22 90	Reims :	03 26 47 49 29
Cherbourg :	02 33 22 59 05	Rennes :	02 99 67 35 34
Clermont-Ferrand :	04 73 28 44 95	Roscoff :	02 98 29 39 55
Dijon :	03 80 78 42 00	Rouen :	02 35 88 17 25
Gap :	04 13 19 12 11	Saint-Nazaire :	02 51 89 92 43
Laval :	02 43 56 42 45	Saint-Quentin :	03 23 67 67 39
Le Mans :	02 43 39 22 90	Saint-Etienne :	04 77 57 62 64
Lorient :	02.56.54.81.81	St Malo :	02 99 40 10 91
Limoges :	05.87.41.83.03	Toulouse :	05 61 40 49 18
Lille :	03 20 04 41 71	Tours :	02 47 28 91 59
Lons le Saunier :	03 84 25 91 86	Valence :	04 75 40 81 40
Lyon :	04 72 84 77 30	Vannes :	02 97 62 00 02
Marseille :	04 91 79 32 44	Versailles :	01 39 55 45 38
Melun :	01 64 09 42 18	Vichy :	04 70 59 23 39
Metz :	03 87 74 41 32		
Mont-de-Marsan :	05 58 51 14 68		
Montluçon :	04 70 64 35 37		

Pour plus d'information sur les établissements PROTEOR :


www.proteor.fr



www.orthopedie.proteor.fr
rubrique : notre réseau

NOTICE D'UTILISATION

ORTHESES SURO-PEDIEUSES DYNAMIQUES

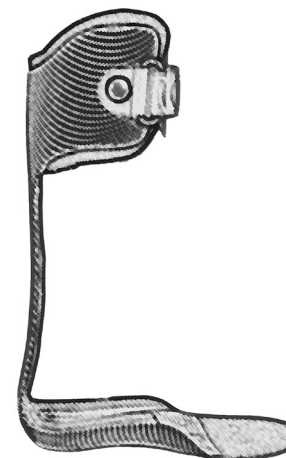

Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un Orthoprothésiste agréé, selon la prescription de votre médecin.

La confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.

Protection des données : Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : dpo@proteor.com



Groupe PROTEOR
6 rue de la Redoute
21850 St Apollinaire

DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

L'orthèse suro-pédieuse dynamique à restitution d'énergie est réalisée sur mesure, en matériau composite.

Les patients susceptibles de bénéficier de l'orthèse suro-pédieuse dynamique à restitution d'énergie sont ceux souffrant de pathologies entraînant un manque de contrôle et de stabilisation de la cheville ou un déficit fonctionnel limitant ou empêchant la marche.

CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

Votre orthèse doit être utilisée avec une chaussure assurant une stabilité suffisante du pied et une chaussette de préférence en coton.


Respecter la hauteur de talon préconisée lors de la prise de mesure de votre orthèse.



CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

Votre orthèse suro-pédieuse dynamique à restitution d'énergie a été conçue pour augmenter votre périmètre de marche et diminuer la fatigabilité au quotidien.

Des efforts trop intenses sur votre orthèse peuvent en diminuer la durée de vie. Ces orthèses ne sont pas conçues pour la pratique d'activité sportive.

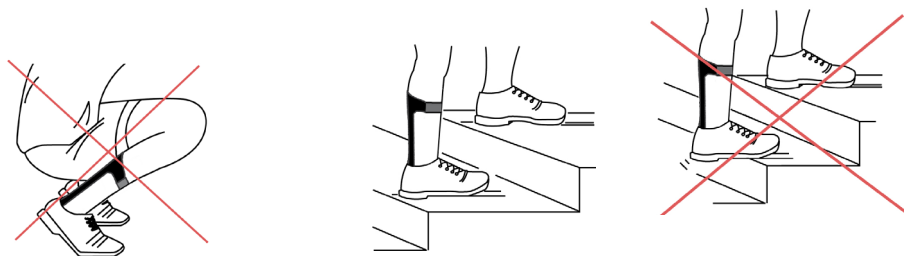

En cas de modification morphologique et notamment en cas de prise de poids, ne pas hésiter à solliciter son orthoprothésiste ou son médecin.

Avant de pratiquer des activités susceptibles de contraintes élevées, consulter votre orthoprothésiste pour savoir si cela est possible.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Une toilette quotidienne est nécessaire. La peau doit être surveillée chaque jour.

L'orthèse doit être nettoyée régulièrement. Le garnissage en matériau synthétique des orthèses doit être lavé régulièrement à l'eau savonneuse, rincé et essuyé.

CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

L'orthèse suro-pédieuse dynamique à restitution d'énergie ne doit pas être placée à proximité d'une forte source de chaleur.

Il ne faut pas la laisser à portée des animaux domestiques.

Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

EFFETS SECONDAIRES :

Réactions cutanées possibles, rougeurs, irritations...

Si les troubles persistent, consulter son médecin et/ou son orthoprothésiste.

CONTRÔLES :

Rester en contact avec son médecin responsable de l'appareillage et son orthoprothésiste pour contrôler l'adaptation de l'orthèse pendant la durée du traitement.

Respecter le suivi médical préconisé.

Signalez toute amorce de rupture à votre orthoprothésiste.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.