

KOHNEN
134, route d'Arlon
L-8008 STRASSEN

Tél. **26 31 33 15**
Fax 26 31 33 16
strassen@kohnen.lu

KOHNEN
26-30, avenue J.-F. Kennedy
L-9053 ETTTELBRUCK

Tél. **81 62 02**
Fax 81 14 77
ettelbruck@kohnen.lu

INSTITUT KOHNEN
3, rue des Bains
L-1212 LUXEMBOURG

Tél. **22 38 08**
Fax 46 92 82
institut@kohnen.lu

NOTICE D'UTILISATION

PROTHESE TIBIALE



Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un professionnel agréé, selon la prescription de votre médecin.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.

Protection des données : Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein du groupe Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : contact@kohnen.lu

DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

Ce type de prothèse est destiné aux amputés d'étiologie traumatique ayant de préférence bénéficié d'une ostéomyoplastie. Les indications sont également étendues aux autres causes d'amputation lorsque l'état général du patient permet un chaussement et une utilisation correcte de la prothèse (sous réserve d'un moignon stable).

Prothèse constituée de :

- un manchon intermédiaire (mousse, caoutchouc latex, silicone injecté, uréthane) ;
- une emboîture réalisée dans l'un des matériaux suivants : matières plastiques ou résines, carbone ;
- de pièces de liaison et/ou adaptateur entre emboîture et tube jambier, avec éventuellement système de recherche d'alignement ;
- un pied ;
- optionnellement une finition.

Chaque prothèse est personnelle car réalisée d'après un moulage orienté et une prise de mesures, suivant les indications du médecin spécialiste.

CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

Dans le cas de manchon de type non adhérent, celui-ci s'ajuste sur le moignon tibial du patient par-dessus des couvres moignons coton ou Nylon (gainés, bonnets, ...).

En cas d'utilisation de manchons adhérents (copolymère, silicone, uréthane), ceux-ci doivent avoir une surface maximum en contact avec la peau pour assurer l'adhérence (éviter les gaines et les bonnets avec ce type de manchon).

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

Une prothèse tibiale est utilisée quotidiennement dans des conditions de vie courante, vie familiale, professionnelle.

Votre prothèse a été réalisée en fonction de votre poids et de l'activité que vous nous avez indiquée. Si vous désirez pratiquer des activités susceptibles de faire subir des contraintes élevées à votre appareillage (course, saut, transport de charges, alors que votre prothèse a été définie pour la marche), consultez votre prothésiste habituel pour savoir si cela est possible.

N'allez pas dans l'eau avec votre prothèse (sauf si elle est prévue pour cet usage). Ne l'exposer pas à la corrosion.

Attention : certain dysfonctionnement ou panne lié sont exclu de la garantie, par exemple, en cas de bris, de choc ou de dégradation, ainsi que le vol, ou le non-respect des périodicités d'entretien et peuvent engager votre entière responsabilité ou celle d'un tiers et les frais de réparation ou de remplacement seraient à votre charge. Le cas échéant, nous vous engageons à contacter votre compagnie d'assurance pour obtenir une garantie complémentaire spécifique.

Dans le cas d'une prothèse de bain, prenez garde au risque de chute sur sol glissant. Rincer à l'eau claire après immersion dans l'eau salée ou chlorée pour éliminer les particules (chlore, sel, sable...) et laisser sécher à l'air libre.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Un nettoyage quotidien du moignon et de l'emboîture avec un savon doux est indispensable.

Changer les gaines de protection tous les jours.

Pour chausser correctement une emboîture contact, le moignon doit être bien sec.

L'amputé doit essuyer avec une serviette l'intérieur de son manchon chaque soir après l'avoir déchaussé. Il est possible de le nettoyer avec une éponge légèrement humide (eau + savon anallergique). L'opération de nettoyage est conseillée en fin de journée en laissant la prothèse à l'air libre toute la nuit. L'amputé préservera plus longtemps son emboîture contre les mauvaises odeurs.

ARTICULATIONS ET APPAREILLAGE TERMINAL :

Ne pas mouiller les articulations et n'utiliser aucun solvant. Un nettoyage supprimant une accumulation de poussière est recommandé régulièrement. En cas de desserrage éventuel de visserie ou prise de jeu anormale, contactez votre prothésiste habituel le plus rapidement possible.

Vous devez disposer de 2 prothèses utilisables en bon état. Utilisez régulièrement votre prothèse de secours afin de contrôler qu'elle est adaptée et en état de fonctionnement en cas d'indisponibilité de votre prothèse habituelle.

CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

Votre appareillage doit être entreposé dans un endroit sec et aéré. Eviter toute source de chaleur importante et le rayonnement solaire direct. Ne jamais laisser votre appareillage derrière une vitre ou un pare-brise de voiture. Le rayonnement solaire peut engendrer une déformation de l'appareillage.

Stocker si possible votre appareil horizontalement pour éviter toute chute risquant d'engendrer une fêlure ou une déformation de votre emboîture. Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

EFFETS SECONDAIRES :

Problème allergique cutané aux matériaux :

↳ Réalisez des tests cutanés auprès d'un dermatologue pour confirmer le problème d'allergie.

Echauffement du moignon suite à un jeu emboîture - moignon trop important :

↳ Portez alors un bonnet de compensation de volume selon les conditions normales de mise en place et resserrez les appareillages de suspension.

Irritations, phlyctème, tuméfactions sur zones d'appui :

↳ Protégez ces zones avec des pansements pour phlyctème.

Dans tous les cas d'inconfort important au niveau du moignon, contactez rapidement votre prothésiste habituel.

CONTRÔLE :

Un contrôle de votre appareil au minimum une fois par année est indispensable afin de procéder à la remise en état de votre prothèse.

Si vous utilisez un manchon avec accrochage distal, vérifiez le serrage du doigt de verrouillage ou du système à cordelette avant de chausser votre prothèse. Lors du chaussage de la prothèse, vous devez vous assurer du verrouillage du système d'accrochage avant de marcher.

En cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre prothésiste habituel pour toute intervention. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.