

KOHNEN

134, route d'Arlon
L-8008 STRASSEN

Tél. **26 31 33 15**
Fax 26 31 33 16
strassen@kohnen.lu

—

KOHNEN

26-30, avenue J.-F. Kennedy
L-9053 ETTTELBRUCK

Tél. **81 62 02**
Fax 81 14 77

ettelbruck@kohnen.lu

—

INSTITUT KOHNEN


3, rue des Bains
L-1212 LUXEMBOURG

Tél. **22 38 08**
Fax 46 92 82
institut@kohnen.lu

CAO/M011 rev. 2 - 07/05/2021

NOTICE D'UTILISATION

PROTHESE DE MEMBRES SUPERIEURS OU INFERIEURS CONVENTIONNELLES

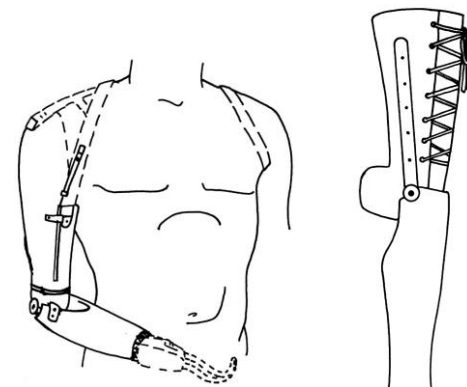

Vous venez de bénéficier d'un appareil orthopédique, dispositif médical sur mesure. Afin de vous garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un professionnel agréé, selon la prescription de votre médecin.

Sa confection a été réalisée à vos mesures, et il ne peut être utilisé que par vous-même. Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement. Le numéro de l'appareil et la date de fabrication sont indiqués sur l'appareil.

Protection des données : Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein du groupe Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : contact@kohnen.lu

DESCRIPTION, PERFORMANCE ET DESTINATION DU DISPOSITIF :

Prothèse constituée de :

- une emboîture réalisée dans l'un des matériaux suivants : cuir, métal, matières plastiques, carbone ou bois ; vernie ;
- un système d'articulation en fonction du niveau d'amputation ;
- une pièce intermédiaire ;
- un appareillage terminal (main, crochet, pied, quillon, ...) ;
- un système de suspension.

CONDITIONS NORMALES DE MISE EN PLACE :

La mise en place de ces appareillages s'effectue à l'aide d'un jersey tubulaire coton, ou d'un bonnet coton épais spécifique de série. L'application de la prothèse nécessite un moignon propre et sec, exempt de toute blessure, ainsi qu'une emboîture en bon état. L'utilisation de talc peut aider au chaussage. Cette mise en place se termine par le bouclage du système de suspension éventuel qui devra être réajusté après quelques minutes de port.

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION :

L'utilisation de ces appareillages sera fonction de :

- l'état général du patient,
- les préconisations du médecin prescripteur,
- le type de prothèse prescrit.

Votre prothèse a été réalisée en fonction de votre poids et de l'activité que vous nous avez indiquée. Si vous désirez pratiquer des activités susceptibles de faire subir des contraintes élevées à votre appareillage (course, saut, transport de charges, alors que votre prothèse a été définie pour la marche) **ou en cas de prise de poids** consultez votre prothésiste habituel pour savoir si cela est possible. N'allez pas dans l'eau avec votre prothèse (sauf si elle est prévue pour cet usage). Ne l'exposer pas à la corrosion.

Lors du changement de type de composant de la prothèse (manchon, genou, cheville...), une phase d'apprentissage peut être nécessaire.

CONDITIONS D'ENTRETIEN :

Un nettoyage quotidien du moignon et de l'emboîture avec un savon doux est indispensable. Changer les gaines de protection tous les jours.

➤ EMBOÏTURE :

CUIR	DURAL, PLASTIQUE	BOIS
Veiller à sécher l'emboîture entre chaque repose de l'appareil. Demander un regarnissage de la prothèse dès que l'emboîture est trop souillée.	Un nettoyage à l'eau savonneuse est recommandé avant chaque repose.	Un nettoyage léger à l'eau savonneuse est possible en prenant garde à bien sécher l'emboîture et en surveillant que le vernis intérieur ne soit pas détérioré.

➤ ARTICULATIONS ET APPAREILLAGE TERMINAL :

Ne pas mouiller les articulations et n'utiliser aucun solvant. Un nettoyage supprimant une accumulation de poussière est recommandé régulièrement. Surveiller tout desserrage éventuel de visserie ainsi que prise de jeu anormale et contacter votre prothésiste habituel le plus rapidement possible. Vous devez disposer de 2 prothèses utilisables en bon état. Utilisez régulièrement votre prothèse de secours afin de contrôler qu'elle est adaptée et en état de fonctionnement en cas d'indisponibilité de votre prothèse habituelle.

CONDITIONS DE STOCKAGE/ELIMINATION :

Votre appareillage doit être entreposé dans un endroit sec et aéré. Eviter toute source de chaleur importante et le rayonnement solaire direct. Ne jamais laisser votre appareillage derrière une vitre ou un pare-brise de voiture. Le rayonnement solaire peut provoquer de fortes élévations de température et engendrer une déformation de l'appareillage. Stocker si possible votre appareil horizontalement pour éviter toute chute risquant d'engendrer une fêlure ou une déformation de votre emboîture. Votre appareillage peut être éliminé selon la législation en vigueur.

EFFETS SECONDAIRES :

Echauffement du moignon suite à un jeu emboîture – moignon trop important :
Portez alors un bonnet de compensation de volume et resserrez les appareillages de suspension.

Irritations, phlyctème, tuméfactions sur zones d'appui :
Protection de ces zones par pansements pour phlyctème.

Dans tous les cas d'inconfort important au niveau du moignon, contactez rapidement votre prothésiste habituel.

CONTRÔLES :

Un contrôle de votre appareil au minimum une fois par année est indispensable afin de procéder à la remise en état de votre prothèse. En cas d'anomalie, n'hésitez pas à contacter votre prothésiste habituel pour toute intervention. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.