

kinoo

TRAITEMENT DE LA PLAGIOCEPHALIE



Guide

des parents pour accompagner bébé
dans le traitement de la plagiocéphalie
avec une orthèse crânienne

Votre bébé

vient de recevoir son casque Kinoo dans le but de corriger sa plagiocéphalie.

Ce casque est un dispositif médical sur mesure, il ne peut être porté que par le bébé pour qui il a été conçu et adapté à sa morphologie. Afin de lui garantir un confort maximal, merci de lire attentivement cette notice. Votre appareil a été fabriqué par un orthoprothésiste agréé sur prescription.



Ce guide a pour objectif de répondre aux questions que vous pouvez vous poser, de vous apporter des conseils pratiques, et de vous proposer un accompagnement dans le port du casque Kinoo au jour le jour.

Les instructions concernant le port et l'utilisation de votre appareillage sont définies par votre médecin prescripteur : il faut les respecter strictement.

Pourquoi l'orthèse crânienne Kinoo est une solution pour mon bébé ?

Donner les meilleurs soins possibles à votre bébé commence par un produit de confiance. Le **casque Kinoo** est le fruit de **2 ans de recherche et développement** se basant sur les **25 années d'expérience de Proteor** dans le domaine du traitement de la plagiocéphalie. Chaque année, **+ de 350 orthèses de correction crâniennes** sont réalisées dans le groupe Proteor.

Une étude réalisée de mars à avril 2019 sur 37 familles ayant fait faire un/des casque(s) par Proteor en 2017, 2018 et 2019, a montré que selon les parents, 3 critères étaient primordiaux pour l'orthèse de correction crânienne de leur enfant :

- Le **bon maintien/ la bonne adaptation** (ni trop grand ni trop petit),
- Le **confort du casque** (irritations, transpiration, légèreté).
- L'**accompagnement** (explication, suivi...),

Proteor est donc parti des constats de cette étude pour repenser toutes les étapes de la conception des orthèses crânienne et apporter une solution innovante avec le casque Kinoo.



Environ **30% + léger** qu'un casque classique. La légèreté du casque est importante à prendre en compte surtout pour les bébés qui peuvent souffrir de torticolis.



Système unique de fermeture ergonomique : peu encombrant pour ne pas gêner votre bébé dans ses mouvements. Il garantit le bon maintien du casque et la sécurité de bébé (fermeture sans pièce pouvant être dissociée et ingérée).



2 jeux de Pads en tissu alcantara lavables à 30°, pour permettre une meilleure hygiène et diminuer le risque d'apparition de mauvaises odeurs.

L'emplacement des pads à l'intérieur du casque est identifié, pour simplifier la mise en place.



Ultra-aéré, la présence de trous et le garnissage avec un minimum de tissu contribuent à diminuer la transpiration et l'irritation pour un meilleur confort de votre bébé.



Comment habituer mon bébé à porter le casque ?



Afin que votre bébé s'habitue à porter l'orthèse Kinoo, il y a **une période d'adaptation pendant laquelle le temps de port de Kinoo est augmenté progressivement**, avant d'atteindre une durée d'environ 20 heures par jour.

L'orthèse doit être portée progressivement en respectant les indications données par le médecin à l'issue des séances d'essayage.

Dans un premier temps, l'orthèse n'est portée que dans la journée, en commençant dès le matin, et jusqu'au soir, au coucher de l'enfant.

Les trois premiers jours, l'orthèse sera portée par phases successives de deux heures et le temps de port sera augmenté de 30 minutes par phase tous les jours :

- Mettez l'orthèse 2 heures.
- Au bout de 2 heures, enlevez l'orthèse.
- Nettoyez la tête de votre bébé avec son produit de toilette habituel (sur un gant, pas un gros shampoing) en insistant sur les rougeurs, rincez et séchez complètement la peau de votre enfant.
- Attendez la disparition complète des rougeurs.
- Remettez le casque deux heures.

Lorsque les rougeurs ont totalement disparu, reprenez le protocole, et ceci jusqu'au soir. L'orthèse sera ainsi mise plusieurs fois dans la journée.

Si les rougeurs sont peu visibles, respectez un temps d'attente minimum de 30 minutes entre chaque mise en place du casque.



Jour	Temps de port par phase	
	Jour	Nuit
1	2h	✗
2	2h30	✗
3	3h00	✗
INCLURE LES SIESTES		
4	3h30	✗
5	4h00	✗
6	4h30	✗
7	4h30	✓

Le protocole élaboré est une garantie de l'efficacité.

Le respect de ce dernier est primordial pour une action optimale du casque.

Mais n'oubliez pas que bébé a également besoin de phases de jeu, d'éveil et de câlin...

A la fin du protocole, l'orthèse devra impérativement être portée de la façon suivante : entre 4h et 4h30 le matin, entre 4h et 4h30 l'après-midi et toute la nuit.

Privilégiez les temps **sans casque** sur les temps de repas et après le bain du soir.



Comment prendre soin du crâne de mon bébé ?



A chaque fois que vous enlevez l'orthèse Kinoo, **nettoyez la tête de votre bébé** avec son produit de toilette habituel en insistant sur les rougeurs : **rincez et séchez complètement la peau de votre enfant.**

Soyez vigilants lors de la mise en place du casque afin d'éviter tous pincements, coincement de tissus ou de peau. Ne pas gêner la mise en place du casque sur la tête du nourrisson (port de barrettes,...).

En cas de doute sur la compression exercée par le casque sur le crâne, contactez votre orthoprothésiste.

Quels effets secondaires peuvent apparaître avec le port de l'orthèse crânienne Kinoo ?

Les zones de rougeurs au niveau des appuis sont normales, mais la peau de votre enfant ne doit en aucun cas être abîmée.

En cas d'apparition de toute lésion cutanée (hématome, brûlure, escarre, écorchure, allergie...), retirez l'orthèse Kinoo jusqu'à guérison complète de la peau de l'enfant.

En cas de chocs, impacts, chutes avec le casque, d'usure du casque (dégradation de la mousse, de la housse, du système de fermeture...), allez consulter votre orthoprothésiste.

Pour toutes questions ou en cas d'apparition de ces effets secondaires, prenez contact avec le médecin spécialiste ou l'orthoprothésiste spécialisé.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être notifié à votre orthoprothésiste et aux autorités compétentes relatives aux dispositifs médicaux.



Pour les trajets en voiture, il est recommandé de placer l'enfant avec son casque dans un siège-auto dos à la route




Comment doit-on entretenir l'orthèse Kinoo ?

Une fois par jour, nettoyez l'orthèse avec du savon de Marseille sur une compresse humide. Rincez-la avec une autre compresse puis séchez-la avec une serviette en coton. Ne pas utiliser de produits agressifs pour le nettoyage du casque



Ne jamais utiliser le sèche-cheveux pour sécher l'orthèse, cela pourrait la déformer sous l'effet de la chaleur !

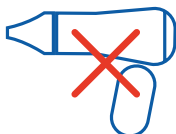

Les pads en tissu doivent être lavés régulièrement à 30°, ceci permet une meilleure hygiène et diminue le risque d'apparition de mauvaises odeurs au cours du traitement. Pour cela, ôter la mousse à l'intérieur.



Il ne faut jamais :

- Prendre de bain ou douche avec l'orthèse (ne pas l'immerger dans l'eau)
- Immerger l'orthèse
- La laisser à la portée des enfants et/ou des animaux domestiques
- La laisser dans un endroit trop chaud (derrière une vitre de voiture par exemple ou exposition directe au soleil par forte chaleur), ou humide au risque de déformer le casque et d'altérer le traitement.



Risque d'étouffement : Ne pas laisser le nourrisson jouer/manipuler le casque quand celui-ci n'est pas en position (sur le crâne), il pourrait le dégrader et ingérer de petits morceaux tel que de la mousse ou s'étouffer avec les housses de pad.

Évitez tout autre contact que celui du crâne avec le casque. Le nourrisson ne doit pas porter le casque à la bouche (évituez qu'il le lèche).

Une fois le traitement de votre enfant terminé, le casque devra être éliminé selon la législation en vigueur.



Vos rendez-vous de suivi

Après la livraison de l'orthèse, une visite de contrôle est nécessaire au bout de 15 jours, pour en vérifier la bonne adaptation et la tolérance cutanée.

Puis un rendez-vous mensuel permet de suivre la croissance et l'évolution de la tête de l'enfant.

Il est impératif de respecter les dates de suivi/visite chez votre orthoprothésiste afin que le casque soit toujours bien adapté au nourrisson.



A large, empty, rounded rectangular box with a blue border, intended for notes related to the first follow-up visit.



A large, empty, rounded rectangular box with a blue border, intended for notes related to the second follow-up visit.



A large, empty, rounded rectangular box with a blue border, intended for notes related to the third follow-up visit.

Pendant toute la durée du traitement,
n'hésitez pas à contacter votre orthoprothésiste spécialisé
si vous avez des questions.

Retrouvez les coordonnées de votre centre Expert Plagiocéphalie KINOO sur

kinoo.proteor.fr



Vous n'êtes pas seul !

Nous avons créé un site web **kinoo.proteor.fr**, pour répondre à toutes les questions des parents et de leurs proches qui s'interrogent sur la plagiocéphalie. Vous trouverez sur ce site des réponses, des conseils et des personnes qui, comme vous, sont concernées par la plagiocéphalie et le port d'une orthèse Kinoo.

Sur ce site, vous trouverez également un forum de discussion, afin que vous puissiez échanger sur votre expérience et partager vos astuces, vos doutes et vos craintes. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas les seuls parents à avoir un enfant qui porte une orthèse crânienne Kinoo.

Afin de vous accompagner au mieux dans le traitement de votre enfant, nous avons développé l'**application Kinoo disponible gratuitement sur l'Apple Store et Android**. Elle vous permettra de suivre l'évolution de la déformation du crâne de votre bébé et de retrouver des conseils et des informations à tout moment sur la plagiocéphalie et le casque Kinoo. Pour accéder aux données concernant votre enfant, et seulement à celles-ci, il vous suffit de scanner votre flashcode personnel sur cette page.

Pour connaître le détail de la Politique de Protection des données mise en œuvre au sein de Proteor, toutes demandes doivent être adressées au Délégué à la Protection des Données : dpo@proteor.com



Kinoo



6 rue de la redoute
21850 Saint Apollinaire
fr.proteor.com